

FRED® EASYPORT® PLUS


Pequeño y potente desfibrilador apto para cualquier persona, momento y lugar



FRED® EASYPORT® PLUS

El compañero ideal para llevar consigo

FRED® easyport® plus, el desfibrilador de bolsillo, cabe fácilmente en el botiquín de emergencia y en el maletín del médico. Es el compañero ideal durante cualquier intervención.

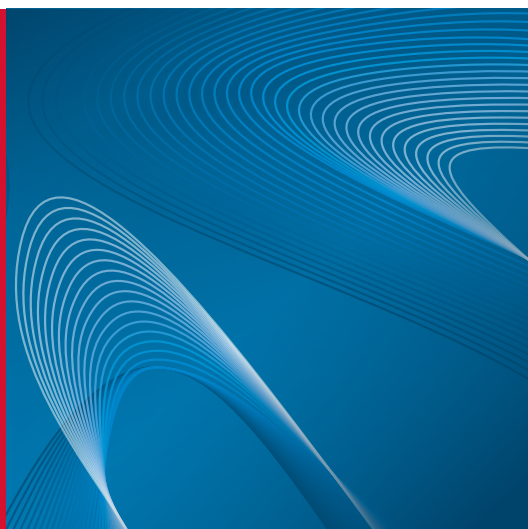

NOS AFECTA A TODOS

Cada año, más de 7 millones de personas en todo el mundo mueren debido a un paro cardíaco súbito. Cualquiera de nosotros puede sufrir un paro cardíaco súbito en cualquier momento y en cualquier lugar.

La desfibrilación consiste en aplicar energía eléctrica al corazón para restablecer un ritmo cardíaco correcto. El uso de un desfibrilador, en combinación con compresiones torácicas bien realizadas, es el único tratamiento que puede salvar la vida de un paciente.

FÁCIL DE TRANSPORTAR

Como desfibrilador de bolsillo, el FRED easyport plus solo pesa 780 gramos y combina su pequeño tamaño con grandes funcionalidades.

DESCARGA EN EL MOMENTO NECESARIO

Las guías internacionales destacan la importancia de reducir al mínimo el retraso en la administración de la descarga.

Para reducir este retraso, el FRED easyport plus tiene un sistema de análisis rápido y carga sistemáticamente la energía requerida para poder administrar la descarga en cuanto lo recomienda el aparato.

ADAPTADO A CUALQUIER USUARIO

El FRED easyport plus es adecuado tanto para usuarios frecuentes como no frecuentes. Puede funcionar con una batería recargable o una pila desechable. El cargador externo puede cargar dos baterías simultáneamente.

INFORMACIÓN DE RCP

La desfibrilación por sí sola no es suficiente. Para mantener un buen aporte de oxígeno a los órganos, la reanimación cardiopulmonar (RCP) debe realizarse correctamente con el fin de restablecer la circulación sanguínea.

El desfibrilador FRED easyport plus le ayuda a conseguir la máxima eficiencia con las compresiones torácicas:

- ❖ indicando la profundidad, frecuencia y retroceso* correctos
- ❖ marcando un ritmo regular mediante el metrónomo

Al usar el sensor ARGUS LifePoint, el responsable de primeros auxilios se beneficia de una ayuda visual a través de mensajes en pantalla codificados por colores mientras realiza las compresiones torácicas.

*El retroceso no está disponible en Francia, Alemania, Reino Unido ni Estados Unidos



SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El FRED easyport plus registra los datos de la intervención, con lo que los doctores y médicos de urgencias pueden tener una visión general más clara del estado del paciente.

- ❖ Calidad de la RCP
- ❖ Curva ECG
- ❖ Curva de impedancia
- ❖ Eventos

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Gracias a las funcionalidades de USB y Bluetooth, los archivos guardados pueden revisarse y gestionarse con facilidad en SEMA, la solución de gestión de datos de SCHILLER.

DESCUBRE EL DISPOSITIVO QUE MÁS TE CONVIENE

El FRED easyport plus está disponible en tres versiones para adaptarse a los diferentes niveles de usuario.



AED FIRST

El FRED easyport plus AED semiautomático, con su cubierta gris, requiere que el responsable de primeros auxilios confirme la administración de una descarga.

Se puede visualizar una curva ECG en la gran pantalla LCD en color.

Apto para equipos de primeros auxilios.



AED AUTO

El FRED easyport plus totalmente automático no requiere ninguna acción por parte del responsable de primeros auxilios. Después de analizar la frecuencia cardíaca, el dispositivo determina si es necesario administrar una descarga. Si es el caso, la descarga se administra automáticamente.

Se puede visualizar una curva ECG en la gran pantalla LCD en color.

Adecuado para personas capacitadas para responder a las emergencias.



AED MANUAL

Caracterizado por su cubierta roja, el FRED easyport plus manual permite a médicos y paramédicos cambiar a la cancelación manual. Gracias a la pantalla de ECG, los profesionales sanitarios pueden determinar si es necesario administrar una descarga.

Adecuado para médicos.



SCHILLER
FRED easyport plus

00:00:04
PLUG AND APPLY ELECTRODES



ELECTRODES
FRED PA-1,
100% ALGOLIN Pro Life Class 1,
Type 2, CARBOHYT AT-101 Heavy



PEQUEÑO Y POTENTE

El FRED easyport plus solo pesa 780 gramos y administra descargas de hasta 200 julios. La tecnología Multipulse Biowave® garantiza una descarga de desfibrilación efectiva y segura mientras se reduce al mínimo el daño al miocardio.

GANAR PRECIOSOS SEGUNDOS

Los electrodos de desfibrilación están preconectados para conseguir una rápida aplicación al pecho del paciente. El análisis de la frecuencia cardíaca comienza inmediatamente para reducir el tiempo hasta que se administra la descarga.

SIEMPRE PREPARADO

El FRED easyport plus realiza autocomprobaciones automáticas regulares para asegurarse de su correcto funcionamiento. Su estado se indica mediante el botón de encendido/apagado intermitente.

TRANSMISIÓN DE DATOS A SEMA

Los datos de la intervención pueden enviarse por USB o Bluetooth para que los revisen los profesionales sanitarios.

DISEÑO PARA DURAR

Con clasificación IP44, el desfibrilador FRED easyport plus es resistente a las salpicaduras del agua.





DESFIBRILADOR DE BOLSILLO

El FRED easyport plus solo mide 150 x 143 milímetros; la fotografía muestra su tamaño original (1:1).

ADECUADO PARA TODOS LOS ENTORNOS

El FRED easyport plus tiene una gran pantalla LCD en color que ajusta automáticamente su brillo para ayudar a visualizar de un vistazo las indicaciones.

MODO PEDIÁTRICO INTUITIVO

Como se utilizan los mismos electrodos, basta con pulsar este botón para cambiar el modo de paciente.

INFORMACIÓN DE RCP

El metrónomo integrado establece el ritmo correcto y guía al responsable de primeros auxilios durante la intervención.

Además, el sensor ARGUS LifePoint proporciona ayuda visual muy precisa a través de mensajes en pantalla codificados por colores para asegurar la mayor efectividad de las compresiones torácicas.

INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADA

Tres sencillos pasos con ilustraciones e instrucciones de voz fáciles de entender.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
 Doral, Florida 33172

North America:
 Phone +1 786 845 06 20
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
 Phone +1 305 591 11 21
 Fax +1 786 845 06 02
 sales@schilleramericas.com
 www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia
 Phone +603 6272 3033
 Fax +603 6272 2030
 sales@schiller.com.my
 www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
 A-4040 Linz
 Phone +43 732 70 99 0
 Fax +43 732 757 000
 sales@schiller.at
 www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
 100015 Beijing, China
 Phone +86 010 52007020
 Fax +86 010 52007020-8016
 info@schillerchina.com
 www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
 10000 Zagreb
 Phone +385 1 309 66 59
 Fax +385 1 309 66 60
 info@schillerzg.hr
 www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
 F-67160 Wissembourg
 Phone +33 3 88 63 36 00
 Fax +33 3 88 63 36 49
 info@schiller.fr
 www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
 F-77608 Bussy St Georges
 Phone +33 1 64 66 50 00
 Fax +33 1 64 66 50 10
 contact@schillerfrance.fr
 www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
 D-85622 Feldkirchen b. München
 Phone +49 89 62 99 81 0
 Fax +49 89 609 50 90
 info@schillermed.de
 www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
 Mumbai - 400 059, India
 Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
 Fax +91 22 2920 9142
 sales@schillerindia.com
 www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
 PL-02-729 Warszawa
 Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
 Fax +48 22 843 20 89
 schiller@schiller.pl
 www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
 125040 Moscow, Russia
 Phone +7 (495) 970 11 33
 Fax +7 (495) 956 29 10
 mail@schiller.ru
 www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
 11010 Beograd
 Phone +381 11 39 79 508
 Fax +381 11 39 79 518
 info@schiller.rs
 www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
 2310 Slovenska Bistrica
 Phone +386 2 843 00 56
 Fax +386 2 843 00 57
 info@schiller.si
 www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
 ES-28232 Las Rozas/Madrid
 Phone +34 91 713 01 76
 Fax +34 91 355 79 33
 schiller@schiller.es
 www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
 CH-8912 Obfelden
 Phone +41 44 744 30 00
 Fax +41 44 740 37 10
 sales@schiller-reomed.ch
 www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
 Okmeydani-Sisli - Istanbul
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)
 Fax +90 212 210 8684
 info@schiller.com.tr
 www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
 Bellshill, ML4 3PR
 Phone +44 1698 744 505
 Fax +44 1698 744 474
 sales@schilleruk.com
 www.schilleruk.com

La disponibilidad del dispositivo en un mercado determinado está sujeta a la autorización administrativa.

2020/03, ES

Article no.: 2.500784



SCHILLER
 The Art of Saving Lives

Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch